


Så använder du hjärtstartaren LIFEPAK CR2.

Vid misstänkt hjärtstopp: Be någon att larma 112 och hämta hjärtstartaren. Starta HLR omedelbart.

- 1** Starta hjärtstartaren genom att öppna locket. Ta tag i locket vid den röda pilen och lyft. Följ hjärtstartarens röstinstruktioner, de kommer att vägleda dig steg för steg.

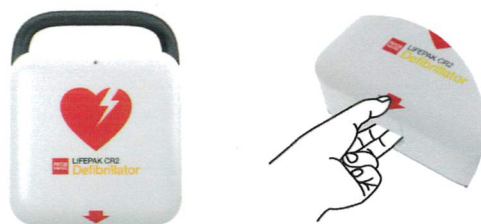

- 2** Ta bort alla kläder från bröstkorgen. Klipp om nödvändigt, torka fuktig hud och raka vid behov. Sax, rakhyvel och andningskydd ska finnas i D-HLR-etuiet.



- 3** Dra i det röda handtaget för att ta fram elektroderna.


Om det är ett barn under 8 år eller under 25 kg, tryck först på knappen barnläge.




- 4** Dra bort en elektrod i taget genom att dra i öglan och placera elektroden på bröstkorgen exakt som bilden på elektroden visar. Stryk fast elektroderna ordentligt mot bröstkorgen.




- 5** Rör inte personen. Hjärtstartaren analyserar nu hjärtrytmen. Om hjärtstartaren hittar en behandlingsbar rytm kommer den att uppmana dig att trycka på defibrilleringsknappen.

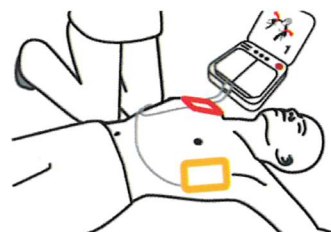

- 6** Tryck på den röda blinkande knappen om defibrillering rekommenderas. Se till att ingen är i fysisk kontakt med personen.

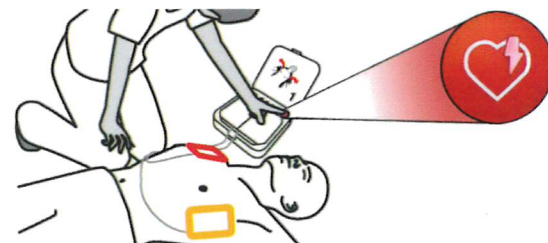

- 7** Starta hjärt-lungräddning. Låt elektroderna sitta kvar. HLR ska pågå med så få avbrott som möjligt. Med två minuters mellanrum upprepas analysen. Fortsätt att följa hjärtstartarens instruktioner tills professionell hjälp anländer.

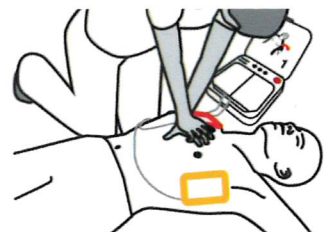

Er kontakt för underhåll och utbildning:

HLR Konsulten Sverige AB
Vretenvägen 10, 171 54 Solna

010-172 22 00
info@hlr-konsulten.se

www.hlr-konsulten.se
utbildning@hlr-konsulten.se